

# Ensayo de campo y la mayoría de la investigación Instrucciones para la recolección intestinal para histopatología

Frederic J. Hoerr, DVM, PhD

June 6, 2024




# ¡Sigue este método para pollos y pavos!

- Recoja la tripa dentro de los 5 minutos posteriores a la muerte/eutanasia.
- Cuanto antes mejor. Cada minuto que el intestino no está en formol se pierde datos.
- Recolectar vísceras de aves muertas durante 20 minutos es una pérdida de tiempo para la puntuación de lesiones.
- Las secciones intestinales están CERRADAS - NO ABIERTAS
- Si hay que abrir la tripa para rasparla, hágalo en otro lugar
- NO APRIETE NI RASPE la porción del intestino para histopatología
- El tejido de 3 a 5 aves puede ir en un recipiente de formalina
- Cuando se complete la recolección del lote, cierre el recipiente y agítelo suavemente para desalojar el contenido intestinal y permitir que la formalina fluya hacia el intestino.


# Recoja la tripa exactamente como se muestra.

- Piezas cortas, longitud máxima de 1 pulgada
- Recógelo en el mismo lugar en cada ave
- De 3 a 5 aves por grupo de edad o parvada
- Todos los tejidos de un grupo pueden ir en un solo recipiente

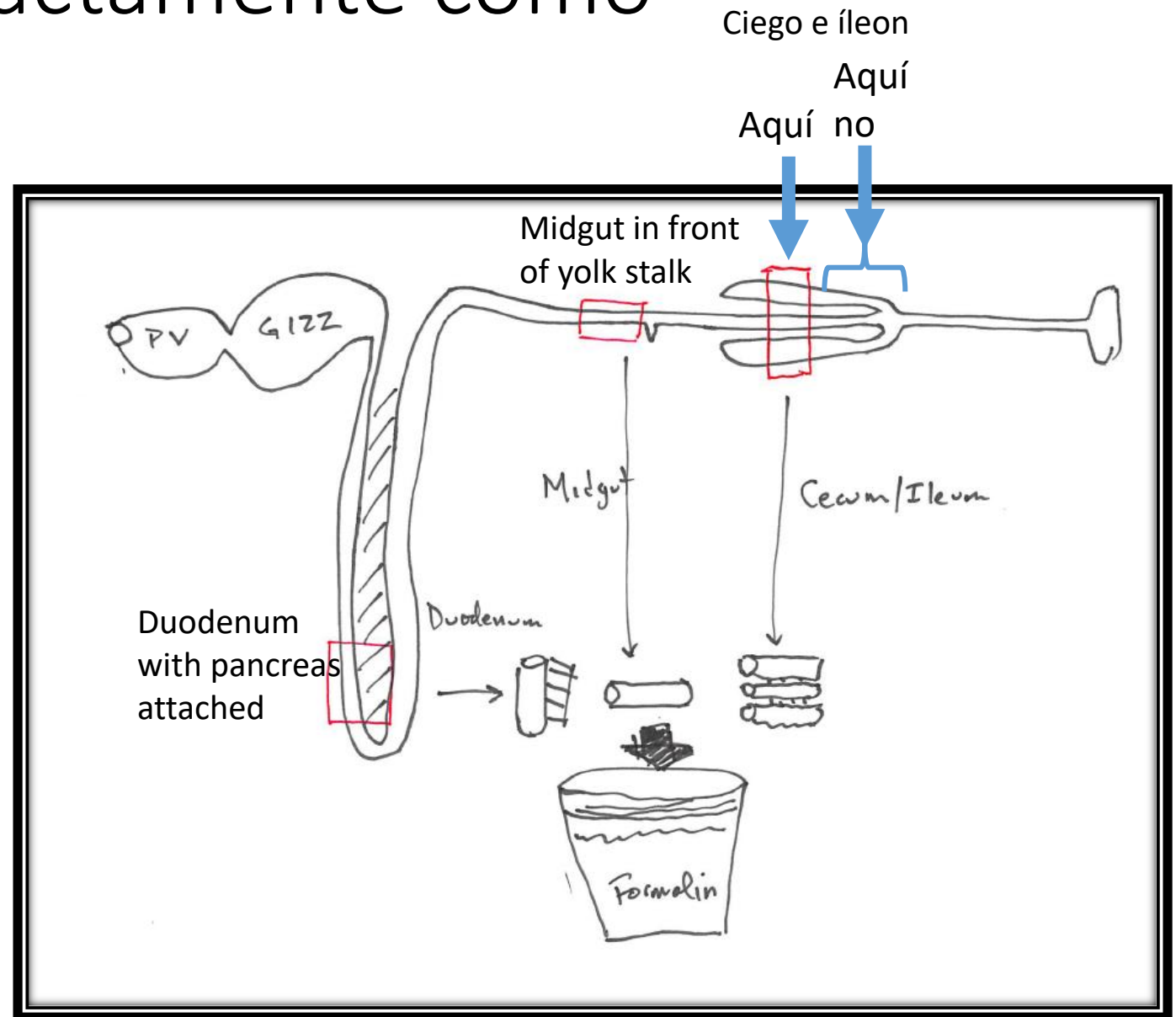

# Los contenedores de formol están disponibles en Amazon

- Utilizar envases de 180 a 250 ml (con formalina de 90 a 125 ml)
- El intestino de 3 a 5 aves puede ir en un recipiente si se recolecta en segmentos de 1 pulgada.
- Use 250 ml para pavos y pollos de engorde más grandes
- Cierre herméticamente antes de enviar.
- Opcional: vierta un poco de formalina antes del envío, pero deje lo suficiente para mantener el pañuelo húmedo.

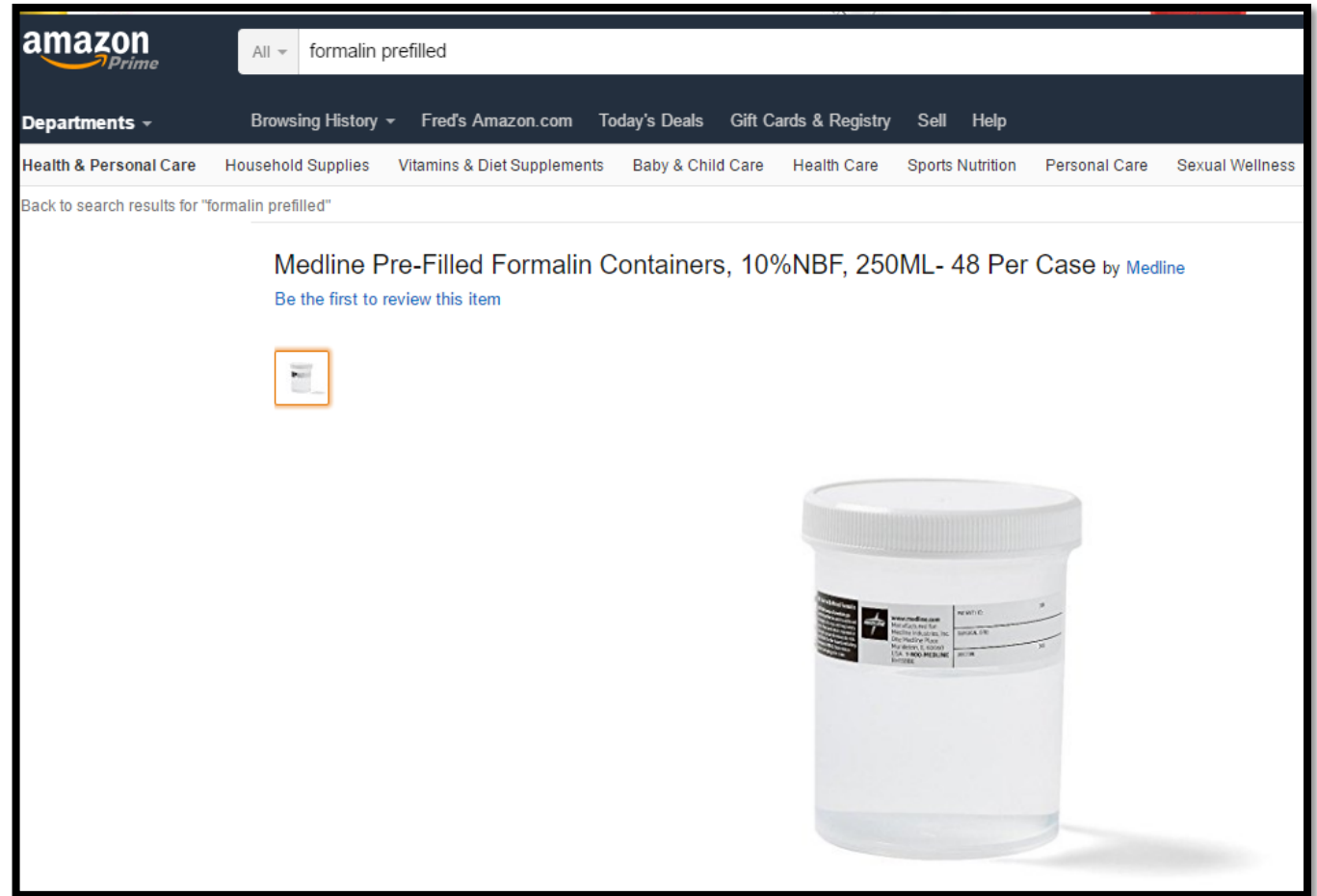

# Embalaje y envío

- Embalaje
- Recipientes de formol firmemente cerrados, con varias toallas de papel para absorber cualquier formalina derramada en el envío
- 2º recipiente alrededor de la formalina y la toalla de papel --- Recomiende bolsas Zip-Lock de 1 o 2 galones
- El contenedor de 3er nivel es una caja de envío de cartón

**Veterinary Diagnostic  
Pathology Lab  
215 Horne Town Rd  
Polkton, NC 28135**

[lab@vetdx.com](mailto:lab@vetdx.com)

704-272-7261

334-750-7566

# Registre las parvadas en Aggio Diagnostic Portal

- <https://diagnostics.aggio.io/login>
- Seleccione: Laboratorio de VDP
- Una línea/fila para cada lote
- Para obtener ayuda: [helpdesk@aggio.io](mailto:helpdesk@aggio.io)
- Todos los resultados se informan a través del portal